

Haarprobennahme

Anleitung zur Testdurchführung

Zu Beachten:

- Bitte für jeden Hund ein gesondertes Antragsformular benutzen.
- Die Proben dürfen niemals vertauscht werden.
- Zwischen der Probennahme bei verschiedenen Hunden bitte unbedingt Händewaschen und auch die Hunde voneinander trennen.
- Der Test enthält einen Briefumschlag und ein Antragsformular.

Durchführung:

- Hände waschen und abtrocknen.
- Mit Daumen und Zeigefinger Haare fassen und mit kurzem Ruck auszupfen.
- Haare direkt in den vorbereiteten Briefumschlag stecken.
- Vorgang wiederholen bis ca. 100 Haare im Umschlag sind.
- WICHTIG nur Haare mit Haarwurzeln sind für die Untersuchung zu verwenden!



- Antragsformular und Proben können in einem normalen Briefumschlag an uns geschickt werden.

Adresse:

GenoCanin
Universität Kassel
Institut für Biologie
Frau Dr. Ina Pfeiffer, Frau Tina Roth
Heinrich-Plett-Strasse 40
34109 Kassel

Bei Rückfragen:

Tel. 0561/804-4135
E-mail: roth@genocanin.de
www.genocanin.de